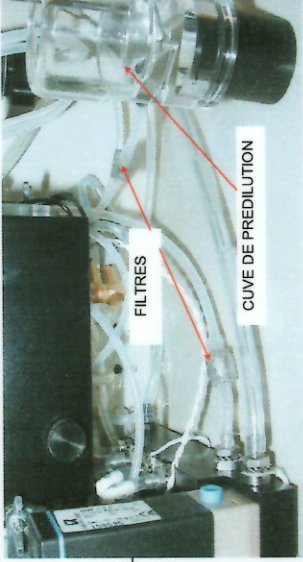


| CALENDRIER DE MAINTENANCE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAINTENANCE                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAINTENANCE Journalière</b><br>Par l'opérateur                                                                                                      | Eteindre par CTRL + V<br>ou programmer dans SETTING / SYSTEM l'heure et la date pour la mise en veille et la ré initialisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
| <b>MAINTENANCE Hebdomadaire</b><br>Par l'opérateur                                                                                                     | Nettoyer l'aiguille et la cuve de pré dilution.<br>Essuyer le sang séché et les tâches de sels avec un tissu mouillé à l'eau distillée.<br>Vérifier les filtres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>MAINTENANCE Mensuelle</b><br>Par l'opérateur                                                                                                        | Vérifier et changer les filtres si ils sont devenus rouge / marron au lieu de blanc.<br>Filtre à caillots : <b>Ref. 3MS09560A</b><br>Boîte de 12 : <b>Ref. 3MS09560</b><br>De plus amples informations pour l'échange des filtres se trouvent dans le <a href="#">Guide utilisateur</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| <b>MAINTENANCE Trimestrielle</b><br>Par l'opérateur<br>La périodicité de ces interventions est fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil.   | Nettoyage complet avec la solution de nettoyage.<br>Mettre la solution de nettoyage dans la cuve de dilution. Appuyer sur F6 et sélectionner " Nettoyage des rubis à l'eau de javel".<br>Solution de nettoyage : <b>Ref. 3MSR0213</b><br>Changer les filtres si nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| <b>MAINTENANCE Annuelle</b><br>Par votre distributeur<br>La périodicité de ces interventions est fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil. | Vérifier et nettoyer ou changer les électrovannes.<br>Micro électrovanne B127 2 voies : <b>Ref. 3MS09450 / 3MS4E450</b> (Selon numéro de série de l'analyseur)<br>Micro électrovanne B127 3 voies : <b>Ref. 3MS09451 / 3MS4E451</b> (Selon numéro de série de l'analyseur)<br>Electrovanne diluant 3 voies : <b>Ref. 3MS95454</b><br>Electrovanne vidange 2 voies pour MS9-3 et MS9-5 : <b>Ref. 3MS95453</b><br><a href="#">FAQ sur notre site Web: VALVE CLEANING</a><br><br>Changer les joints.<br>Kit de joints seringue : <b>Ref. 3MS95905</b><br>Joint pour tête lave aiguille : <b>Ref. 3MS95618</b><br>Joint téflon tête lave aiguille pour MS9-3 et MS9-5: <b>Ref. 3MS95619</b><br>Joint téflon tête lave aiguille pour MS9-3s et MS9-5s: <b>Ref. 3MS95619</b><br><a href="#">FAQ sur notre site Web: How to replace the teflon ring and the o-ring on the micropliston of MS9-5 / MS9-3</a><br><br>Graisser le piston et le système X/Y avec la graisse spéciale<br>Graisse spéciale pompe seringue: <b>Ref. 3MS09890</b><br><br>Vérifier et changer les tuyaux si nécessaire.<br>Kit tuyaux pour maintenance : <b>Ref. 3MS95907</b><br><br>Changer la cassette pompe péristaltique.<br>Cassette pour pompe péristaltique pour MS9-3 et MS9-5 : <b>Ref. 3MS95412 B</b><br>Cassette pour pompe péristaltique pour MS9-3s et MS9-5s: <b>Ref. 3MS95412 B</b><br>Cassette pour pompe à déchets pour MS9-3s: <b>Ref. 3MS93S413 B</b><br><br>Vérifier l'état du lave-aiguille et changer la tête de lavage si nécessaire<br>Lave aiguille complet : <b>Ref. 3MS95935</b> |                                                                                   |