

CALENDRIER DE MAINTENANCE

Annexe au guide d'utilisateur

CALENDRIER DE MAINTENANCE	MAINTENANCE
MAINTENANCE Journalière Par l'opérateur	Eteindre par CTRL + V ou programmer dans SETTING / SYSTEM l'heure et la date pour la mise en veille et la ré initialisation.
MAINTENANCE Hebdomadaire Par l'opérateur	Nettoyer l'aiguille et la cuve de pré dilution. Essuyer le sang séché et les tâches de sels avec un tissu mouillé à l'eau distillée. Vérifier les filtres.
MAINTENANCE Mensuelle Par l'opérateur	Vérifier et changer les filtres si ils sont devenus rouge / marron au lieu de blanc. Filtre à caillots : Ref. 3MS09560A Boîte de 12 : Ref. 3MS09560 De plus amples informations pour l'échange des filtres se trouvent dans le Guide utilisateur.
MAINTENANCE Trimestrielle Par l'opérateur La périodicité de ces interventions est fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil.	Nettoyage complet avec la solution de nettoyage. Mettre la solution de nettoyage dans la cuve de dilution. Appuyer sur F6 et sélectionner " Nettoyage des rubis à l'eau de javel". Solution de nettoyage : Ref. 3MSR0213 Changer les filtres si nécessaire.
MAINTENANCE Annuelle Par votre distributeur La périodicité de ces interventions est fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil.	Vérifier et nettoyer ou changer les électrovannes. Micro électrovanne B127 2 voies : Ref. 3MS09450 / 3MS4E450 (Selon numéro de série de l'analyseur) Micro électrovanne B127 3 voies : Ref. 3MS09451 / 3MS4E451 (Selon numéro de série de l'analyseur) Electrovanne diluant 3 voies : Ref. 3MS95454 Electrovanne vidange 2 voies pour MS9-3 et MS9-5 : Ref. 3MS95453 FAQ sur notre site Web: VALVE CLEANING Changer les joints. Kit de joints seringue : Ref. 3MS95905 Joint pour tête lave aiguille: Ref. 3MS95618 Joint téflon tête lave aiguille pour MS9-3 et MS9-5: Ref. 3MS95619 Joint téflon tête lave aiguille pour MS9-3s et MS9-5s: Ref. 3MS95619 FAQ sur notre site Web: How to replace the teflon ring and the o-ring on the micropiston of MS9-5 / MS9-3 Graisser le piston et le système X/Y avec la graisse spéciale Graisse spéciale pompe seringue: Ref. 3MS09890 Vérifier et changer les tuyaux si nécessaire. Kit tuyaux pour maintenance : Ref. 3MS95907 Changer la cassette pompe péristaltique. Cassette pour pompe péristaltique pour MS9-3 et MS9-5 : Ref. 3MS95412 B Cassette pour pompe péristaltique pour MS9-3s et MS9-5s: Ref. 3MS95412 B Cassette pour pompe à déchets pour MS9-3s: Ref. 3MS93S413 B Vérifier l'état du lave-aiguille et changer la tête de lavage si nécessaire Lave aiguille complet : Ref. 3MS95935

